

RedVac Vakuum Kopfkissen

Gebrauchsanweisung



www.redvac.com

Zweckbestimmung :

Das RedVac Vakuum Kopfkissen ist zur Immobilisation des Kopfes bei Erwachsenen Patienten bestimmt. Die Anwendung beschränkt sich auf die präklinische Versorgung und die erste Phase der klinischen Versorgung. Für eine dauerhafte Immobilisation des Kopfes sind die RedVac Vakuum Kopfkissen nicht geeignet. Offene Wunden werden vor Anlegen des Kopfkissens nach den aktuellen Regeln der aseptischen Wundversorgung steril verbunden.

Anwendung:

Bei der RedVac Vakuumschiene handelt es sich um ein Medizinprodukt das nur von eingewiesenem und regelmäßig auf das Produkt geschultem medizinischen Fachpersonal angewendet werden darf. Die Art der Anwendung richtet sich nach den aktuellen, allgemein anerkannten medizinischen Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Fachgesellschaften.

- Offene Wunden oder nicht intakte Hautstellen nach den aktuellen Empfehlungen zur aseptischen Wundbehandlung versorgen und steril abdecken.
- Den Kopf manuell fixieren, bis das Kopfkissen angeformt und abgesaugt ist. Zur Fixierung und Anformung des Kopfkissens die Flauschbandgurte über der Stirn und dem Kinn schließen und schonend spannen.
- Zum Absaugen des Kopfkissens muss das Ventil geschlossen bleiben. Den Absaugschlauch der Pumpe mit passendem Adapter direkt auf das Absaugventil stecken und Luft aus dem Kopfkissen absaugen.
- Nach Erreichen einer ausreichenden Festigkeit des Kopfkissens Absaugschlauch vom Ventil entfernen.
- Überprüfung der Flauschbandgurte auf festen und für den Patienten angenehmen Sitz.
- Achtung: Den Kopf regelmäßig auf eine ausreichende Blutzirkulation, angenehmen Sitz des Kopfkissens und sonstige Besonderheiten im Zusammenhang mit der Anwendung des Kopfkissens prüfen.

Reinigung und Pflege / Desinfektion:

Das Kopfkissen kann mit Wasser und einer Seifenlösung grob gereinigt werden. Eine extreme mechanische Reinigung, die zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen kann, ist zu vermeiden.

Desinfektion ausschließlich mit alkoholbasierten (Ethanol / Propanol) Desinfektionsmitteln. Bei der Verwendung von anderen Substanzklassen kann es zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials kommen. Keine Lösungsmittel verwenden.

Um zu vermeiden dass während der Reinigung Flüssigkeiten ins Innere des Kopfkissens gelangen, muss das Ventil geschlossen bleiben. Nach der Reinigung muss das Kopfkissen sorgfältig getrocknet werden.

Lagerung:

Das Kopfkissen muss trocken gelagert werden.

Wiederverwendbarkeit: Das Produkt kann bei erhaltener Funktion und unbeschädigtem Material wiederverwendet werden. Vor einer erneuten Anwendung muss sich der Anwender vom ordnungsgemäßen Zustand des Produktes überzeugt haben. Es dürfen nur Produkte in einwandfreiem technischen und hygienischen Zustand erneut angewendet werden.

Kühl und Trocken lagern!

Technische Angaben Vakuum Kopfkissen VK90:

Länge: ca. 30 cm
Breite: ca. 43 cm
Höhe: ca. 7 cm
Gewicht: ca. 0,58 kg

Technische Angaben Vakuum Kopfkissen VK92

Länge: ca. 53 cm
Breite: ca. 68 cm
Höhe: ca. 7 cm
Gewicht: ca. 0,53 kg

Hersteller : Kohlbrat & Bunz Gesellschaft mbH, Loretostrasse 4-8, A-5550 Radstadt

Vertrieb für Deutschland: 

medida GmbH & Co.KG, Sangenweg 19, 64589 Stockstadt
Telefon: 06158 / 8785 0 Fax: 06158 / 8785 190
Internet: www.medida.de und www.RedVac.de

Die Inhalte dieser Gebrauchsanleitung sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung.