



[www.redvac.com](http://www.redvac.com)

## RedVac® Vakuum Matratze Gebrauchsanweisung

### Zweckbestimmung :

Die RedVac Vakuum Matratze ist zur Fixierung und Immobilisation bei Patienten mit Verdacht auf Wirbelsäulenfrakturen und verletzen oder gebrochenen Extremitäten bestimmt. Die Anwendung beschränkt sich auf die präklinische Versorgung und die erste Phase der klinischen Versorgung. Für eine dauerhafte Immobilisation im Sinne eines Gipsverbandes sind die RedVac® Vakuummatratzen nicht geeignet. Offene Wunden werden vor Anwendung der Vakuummatratze nach den aktuellen Regeln der aseptischen Wundversorgung steril verbunden.

### Anwendung:

Bei der RedVac Vakuum Matratze handelt es sich um ein Medizinprodukt, das von regelmäßig auf Produkte dieser Art geschultem medizinischen Fachpersonal angewendet werden darf. Die Art der Anwendung richtet sich nach den aktuellen, allgemein anerkannten medizinischen Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Fachgesellschaften.

- Offene Wunden oder nicht intakte Hautareale nach den aktuellen Empfehlungen zur aseptischen Wundbehandlung versorgen und steril abdecken.
- Die Umlagerung des Patienten sollte mit einer geeigneten Umlagerungshilfe (z.B. Schaufeltrage) nach den aktuellen Richtlinien durchgeführt werden. Zur Fixierung und Anformung der Vakuummatratze die Gurte schliessen und die Gurtbänder anziehen.
- Zum Absaugen der Vakuummatratze muss das Ventil geschlossen bleiben. Den Absaugschlauch der Pumpe mit passendem Adapter direkt auf das Absaugventil stecken und Luft aus der Matratze absaugen.
- Nach Erreichen einer ausreichenden Festigkeit der Vakuummatratze Absaugschlauch vom Ventil entfernen.
- Überprüfung der Gurte auf festen und für den Patienten angenehmen Sitz.



### Reinigung und Pflege / Desinfektion:

Die Vakuummatratze kann mit Wasser und einer Seifenlösung grob gereinigt werden. Eine extreme mechanische Reinigung, die zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen kann, ist zu vermeiden.

Desinfektion ausschließlich mit alkoholbasierten (Ethanol / Propanol) Desinfektionsmitteln. Bei der Verwendung von anderen Substanzklassen kann es zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials kommen. Keine Lösungsmittel verwenden.

**Wiederverwendbarkeit:** Das Produkt kann bei erhaltener Funktion und unbeschädigtem Material wiederverwendet werden. Vor einer erneuten Anwendung muss sich der Anwender vom ordnungsgemäßen Zustand des Produktes überzeugt haben. Es dürfen nur Produkte in einwandfreiem technischen und hygienischen Zustand erneut angewendet werden.

### Kühl und Trocken lagern!

Hersteller :



Gesellschaft mbH, Loretostrasse 4-8, A-5550 Radstadt

Vertrieb für Deutschland:

**medida**<sup>®</sup>  
Notfallausrüstung

medida GmbH & Co.KG, Sangenweg 19, 64589 Stockstadt  
Telefon: 06158 / 8785 0 Fax: 06158 / 8785 190  
Internet: [www.medida.de](http://www.medida.de) und [www.RedVac.de](http://www.RedVac.de)

Die Inhalte dieser Gebrauchsanleitung sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung .