

## **HINWEISE ZU INSTRUMENTEN IN STANDARD-QUALITÄT (verchromt)**

Sehr geehrter Kunde,

sie haben ein Instrument der Standard-Qualität – Import erworben, das **nur für die Heißluft-Sterilisation und nicht für die Dampf-, Gas- oder Zentralsterilisation** geeignet ist. Diese Instrumente sind auch **nicht für den OP- Bereich** verwendbar.

Sie sind konzipiert für den Einsatz **ohne** direkten Körperkontakt im **stationären** Schwesternbereich.

Daher übernehmen wir für diese Produktgruppe lediglich eine Garantie der Gebrauchstüchtigkeit im Bezug auf die Funktionalität, jedoch **keinerlei Produktgarantie**.

Bitte legen sie diese Instrumente für den stationären Schwesternbereich **nicht** mit Instrumenten aus hochwertigem Edelstahl in den Sterilisator, da diese durch die Kontamination mit den evt. gelösten Stoffen der Stations-Instrumente beschädigt würden.

Wenn sie die Instrumente mit Reinigungskonzentrat säubern, müssen diese unbedingt sofort mit **destilliertem oder entmineralisiertem Wasser abgespült und getrocknet** werden, da diese sonst korrodieren.

Bei der Trocknung ist dafür Sorge zu tragen, dass alle rauen Flächen, wie Zähne, Riefen, Durchsteckschlüsse, Sperren, und Schrauben besonders getrocknet werden, damit dort kein Wasser stehen bleiben kann.

Bitte geben Sie diese Informationen an Ihre Nutzer weiter.

**Hersteller**

Christophorus CBC GmbH  
Seestr. 66  
69214 Heidelberg-Eppelheim

Tel. 06221/164401  
Fax 06221/164411

e-mail: kontakt@cbcgmbh.de  
Internet: www.cbcgmbh.de

**Vertrieb**

medida GmbH & Co.KG  
Sangenweg 19  
64589 Stockstadt

Tel. 06158/8785-0  
Fax 06158/8785-190

e-mail: mail@medida.de  
Internet: www.medida.de